



Haftvermittler für Silikonoberflächen

## A. Produktbeschreibung

APHIX™ ist ein sehr dünnflüssiger Haftvermittler, der einfach mit einem Pinsel auf gehärtete Silikonoberflächen aufgetragen wird. Es dient vor allem als Anhafthilfe für Klebebänder, Wundpflaster und Verbände auf medizinischen Simulationsobjekten aus Silikon, wie z.B. Trainingspuppen oder Hautnaht-Trainingspads (Suture Pads).

## B. Lagerung • Haltbarkeit • Warnhinweise

Bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) lagern und verwenden. Verslossene Gebinde sollten innerhalb von 6 Monaten nach Erhalt verarbeitet werden. Nach Öffnung verkürzt sich die Haltbarkeit des Materials. Restmengen daher so schnell wie möglich verarbeiten. Nach Materialentnahme den Behälter sofort wieder verschließen. Wärmere Temperaturen verkürzen die Lagerzeit zusätzlich.

## C. Anwendung

Den Behälter vor der Entnahme ausgiebig schütteln! Reinigen Sie zuerst die Silikonoberfläche mit NOVOCSTM GLOSS, um Verschmutzungen und Ölrückstände zu entfernen. Danach die Silikonoberfläche 2 Minuten trocknen lassen. APHIX™ kann mittels Wattestäbchen, latexfreien Schwämmchen oder Pinseln aufgetragen werden. **Wichtig:** Im Anschluss 10 Minuten trocknen lassen. Der haftvermittelnde Effekt kann nur dann eintreten, wenn

## D. Sicherheitshinweise

Das **Sicherheitsdatenblatt** für dieses oder andere Smooth-On Produkte sollte vor deren Anwendung gelesen werden und ist bei KAUPO erhältlich. Alle Smooth-On Produkte sind bei Befolgung der Hinweise ungefährlich. Augenkontakt unbedingt vermeiden. Im Kontaktfall die Augen 15 Min. lang mit Wasser auswaschen und sofort ärztliche Hilfe aufsuchen. Von der Haut mit Seife und Wasser entfernen. Vorgaben zum Umgang mit leichtentzündlichen Stoffen beachten!

APHIX™ ist schnell trocknend und enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen (VOC). Ein einzelner Auftrag ist für wiederholte Anwendungen ausreichend. APHIX™ lässt sich mit dem Lösungsmittel NOVOCSTM GLOSS (ebenfalls ohne VOC) restlos wieder von der Silikonoberfläche entfernen.

Das Tragen von Augenschutz, Gummihandschuhen und langärmeliger Bekleidung wird empfohlen.

**Achtung:** APHIX™ ist eine entzündliche Flüssigkeit mit entstehenden entzündlichen Dämpfen. Von Feuer- und Hitzequellen fernhalten. In gut belüfteter Umgebung verwenden.

das aufgetragene APHIX™ vollständig getrocknet ist. Pflaster und Verbände können nun auf dem Silikonkörper besser fixiert werden. Ein einzelner Auftrag ist für eine wiederholte Anwendung ausreichend.

**Entfernen von APHIX™:** Der Haftvermittler lässt sich mit NOVOCSTM GLOSS rückstandslos von den Silikonoberflächen entfernen.

**Wichtig:** Die Angaben dieses Informationsblattes werden als korrekt betrachtet. Allerdings wird keine Garantie übernommen bezüglich der Daten, den Ergebnissen die daraus resultieren oder, dass eine Anwendung ein bestehendes Patent verletzt.

Der Anwender hat die Eignung des Produktes für die vorgesehene Anwendung zu bestimmen und alle Risiken und Verpflichtungen die damit in Verbindung stehen zu berücksichtigen.



**KAUPO**®  
CREATING EMOTIONS

» **KAUPO Plankenhorn e.K.**  
Kautschuk & Polyurethane  
Carl-Benz-Straße 4  
D – 78549 Spaichingen

Fon +49.74 24.95 842-3  
Fax +49.74 24.95 842-55

info@kaupo.de  
www.kaupo.de